

FSL2 LibreLink How To

How To Remove and Replace Your FreeStyle Libre 2 System Sensor

This script applies to both MG and MMOL formats (only difference is glucose and ADC numbers)

MMOL ADC-90704-F v2.0

AUDIO

MUSIC

[ANNOUNCER VO]

Lorsque votre capteur atteint la fin de sa période de port, il s'arrête automatiquement de fonctionner.

[ANNOUNCER VO]

À ce moment, l'appli ou le lecteur vous informera qu'il est temps de remplacer le capteur.

[ANNOUNCER VO]

Jack va maintenant nous montrer comment retirer un capteur.

[ANNOUNCER VO]

Pour retirer un vieux capteur...



... tirez le bord de l'adhésif vers le haut...

... et décollez-le lentement en un seul mouvement. Voir la notice du capteur pour savoir comment vous débarrasser de votre capteur usagé.

[ANNOUNCER VO]

Pour mettre en place un nouveau capteur, choisissez un nouvel endroit à l'arrière...

[ANNOUNCER VO]

... de la partie supérieure de votre bras...

[ANNOUNCER VO]

... que vous désinfecterez et laisserez sécher à l'air libre.

[ANNOUNCER VO]

Puis préparez la capsule et l'applicateur du capteur de la façon indiquée dans la vidéo Comment mettre votre capteur en place.

[ANNOUNCER VO]

Mettez ensuite le capteur en place.



Assurez-vous que le capteur tient bien en place après sa pose.

Retirer et remplacer votre capteur est aussi simple que ça!