

Audio
MUSIC
MOM VO: L'un des avantages du...
MOM VO: ... système FreeStyle Libre 2 de mon fils...
MOM VO: ... est la quantité d'informations sur le glucose qu'il a à portée de main...
MOM VO: ... et qui sont mises à jour toutes les minutes sur son téléphone intelligent.
MOM VO: Et il a un compte LibreView, alors ses données de glucose sont automatiquement envoyées à son médecin entre les visites.
ANNOUNCER VO: LibreView est un système infonuagique sécurisé...
ANNOUNCER VO: ... utilisé principalement par les médecins, pour prendre en charge les patients utilisant les produits de la famille FreeStyle Libre.
ANNOUNCER VO:

Une fois que vous êtes connecté(e), votre médecin reçoit vos données de glycémie sous forme de rapports cliniques...

ANNOUNCER VO:

... qu'il ou elle peut utiliser pour mieux comprendre comment vous aider à gérer votre diabète.

ANNOUNCER VO:

Lier votre compte à celui de votre médecin est simple.

ANNOUNCER VO:

La première étape consiste à vous créer un compte LibreView, si vous n'en avez pas déjà un.

ANNOUNCER VO:

Vous pouvez créer un compte directement à partir de l'appli FreeStyle Libre 2.

ANNOUNCER VO:

Ensuite, vous devrez établir une connexion entre votre compte LibreView...

ANNOUNCER VO:

... et celui de votre médecin.

Il existe deux façons de procéder...

ANNOUNCER VO:

La première consiste à partager avec votre médecin l'adresse courriel que vous avez utilisée pour créer votre compte LibreView...

... et à lui demander de vous inviter à vous connecter.

ANNOUNCER VO:

L'autre option consiste à lui demander l'identifiant LibreView de son cabinet et à l'entrer dans l'appli FreeStyle Libre 2.

ANNOUNCER VO:

Pour lier vos comptes, appuyez sur le menu depuis l'écran d'accueil de l'application FreeStyle Libre 2.

ANNOUNCER VO:

Puis, cliquez sur APPLICATIONS CONNECTÉES.

ANNOUNCER VO:

Cliquez ensuite sur SE CONNECTER ou GÉRER dans LibreView.

ANNOUNCER VO:

Si votre médecin a utilisé votre adresse courriel pour vous inviter, vous verrez une INVITATION EN ATTENTE.

ANNOUNCER VO:

Si votre médecin vous a communiqué l'identifiant de son cabinet, vous pouvez cliquer sur SE CONNECTER À UNE CLINIQUE VIRTUELLE et le saisir ici. Suivez les instructions pour terminer la configuration.

ANNOUNCER VO:

Votre médecin utilisera vos rapports,...

ANNOUNCER VO:

... y compris le temps dans la plage cible, pour aider à relever vos schémas et vos tendances de glucose...

ANNOUNCER VO:

... et prendre des décisions thérapeutiques plus éclairées concernant la gestion de votre diabète.

Et il ou elle peut utiliser LibreView à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.

MOM VO:

C'est formidable que Daniel puisse facilement partager...

... ses données de glucose avec son médecin...

... directement à partir de son téléphone.

MOM VO:

Son médecin peut aussi consulter ses schémas et ses tendances pour l'aider à gérer son diabète à distance.

ADC1361 - FRE

MUSIC