


Näin saat sensorin pysymään paikallaan.

Maksimoi käyttöaika kolmen yksinkertaisen vaiheen avulla:

1 Pese

Käytä tuoksuttomia ja kosteuttamattomia saippuuita sensorin kiinnityskohdan pesemiseen, poistaaksesi mahdolliset rasvajäämät.

Ajele liialliset ihokarvat olkavarren takaosasta (hyväksytty kiinnityspaikka), jotta liima tarttuu kunnolla.

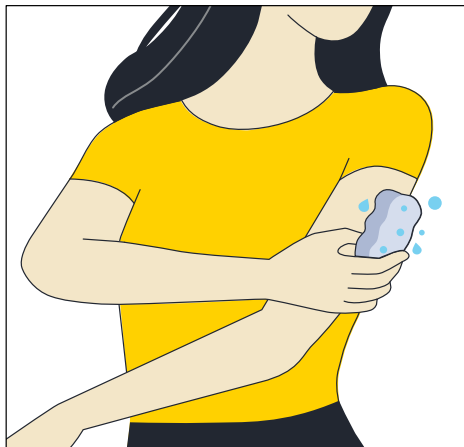


2 Puhdista

Kun olet pessyt ja kuivannut kiinnityskohdan, pyyhi se vielä alkoholipyyhkeellä. Älä käytä kosteusvoidetta, kunnes sensori on paikallaan.



3 Kuivaa

Varmista, että iho on kuivunut kokonaan ennen sensorin kiinnittämistä. Se voi kestää jonkin aikaa riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

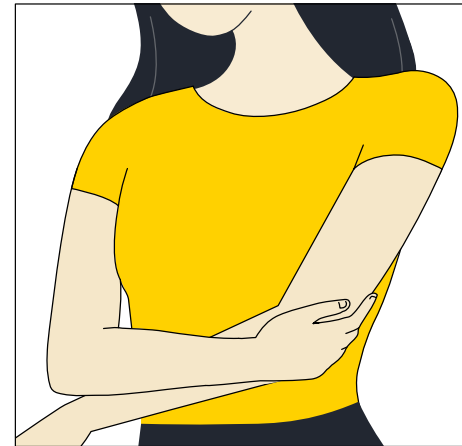


VINKKI: Käy suihkussa ennen yllä mainittujen vaiheiden suorittamista, parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Vinkkejä sensorin suojaamiseen.

Sensorisi on suunniteltu kestämaan jokapäiväisen elämän rasituksia. Mutta jotta se pysyisi paikallaan mahdollisimman pitkään, voi olla hyvä miettiä muutamia asioita:

Taputtele iho aina kuivaksi, kun olet käynyt suihkussa tai uinut¹, varo vetämästä sensoria irti pyyhkeellä.

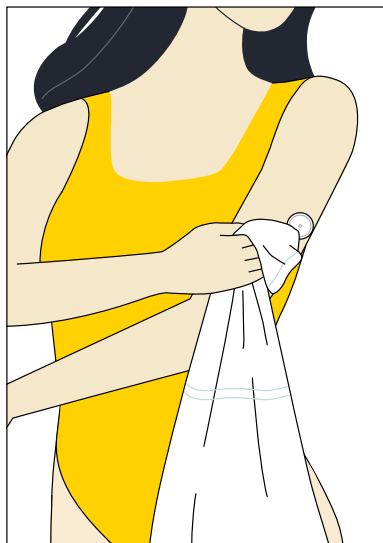


Käytä väliä vaatteita² ja ota rauhallisesti pukeutuessasi, jotta sensoria ei jää kiinni vaatteisiin tai irtoa.



Yritä olla koskettelematta sensoria ja pidä se suojassa pieniltä, uteliailta sormilta.



Ole tietoinen esteistä jokapäiväisessä elämässä kuten ovenkarmit, auton ovet, turvavyöt ja huonekalujen reunat.

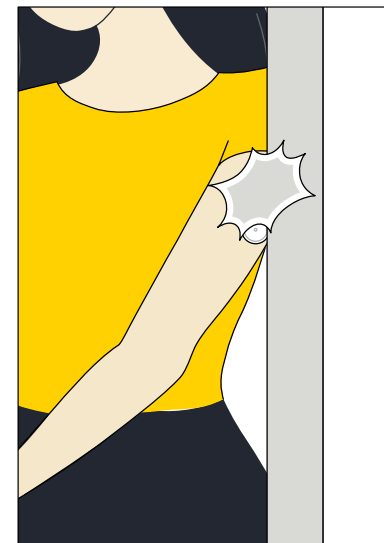

**HARRASTATKO
KONTAKTILAJEJA
TAI RASKASTA LIIKUNTAA?**

Mieti, haluatko lisätehoa kiinnitykseen? Voit kokeilla päälle laitettavaa sidosta³ tai vastaavaa. Valitse sensorin kiinnityskohta olkapäiden takaosasta niin, että sensorin irtoamisriski on mahdollisimman pieni.

FreeStyle Libre -järjestelmät on tarkoitettu soluvälinesteen glukoositasojen mittaamiseen diabetesta sairastavilla henkilöillä. Lue käyttäjän ohjekirja ennen käytön aloittamista. FreeStyle Libre 2 Flash -glukoosinsurantajärjestelmä ja FreeStyle Libre 3 -jatkuva glukoosinsurantajärjestelmä ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita. CE 2797. Valmistaja: Abbott Diabetes Care Ltd., Range Road, Witney, Oxon, OX29 0YL, UK.

1. Sensori on vedenkestävä enintään yhden metrin syvyyteen asti. Älä pidä pinnan alla 30 minuuttia pidempään. **2.** Lukulaite voi hakea sensorin tiedot 1-4 cm:n etäisyydeltä sensorista. **3.** Jos suojaat sensorin sidoksella, se on laitettava sensorin kiinnittämisen yhteydessä. Sensorin keskellä olevaa aukkoa ei saa peittää. Tarvittaessa voit lisätä lääkinällisiä sidoksia tai lääkinällistä teippiä, mutta niitä ei saa poistaa ennen kuin on aika vaihtaa sensoria.

© 2025 Abbott. Sensorin ulkokuori, FreeStyle, Libre ja niihin liittyvät tavaramerkit ovat Abbottin tavaramerkkejä. ADC-108523 v1.0 02/25.

www.FreeStyle.Abbott · 0800 555 500 · Abbott Oy · Karvaamokuja 2A · 00380 Helsinki