



## Χρήσιμες συμβουλές για την εφαρμογή του αισθητήρα

Προετοιμάστε την επιδερμίδα σας  
**ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:**



### ΠΛΥΝΕΤΕ

Χρησιμοποιήστε σαπούνι χωρίς άρωμα και ενυδατικούς παράγοντες για να πλύνετε την περιοχή όπου θα τοποθετήσετε τον αισθητήρα.



### ΑΠΟΛΥΜΑΝΕΤΕ

Χρησιμοποιήστε ένα μαντηλάκι αλκοόλης (όχι λοσιόν ή τζελ αλκοόλης) για να απολυμάνετε το σημείο και να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα λιπαρότητας.



### ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ

Αφήστε την επιδερμίδα να **στεγνώσει πλήρως** πριν εφαρμόσετε τον αισθητήρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν σκοπεύετε να εφαρμόσετε τον αισθητήρα αφού κάνετε ντους ή κολυμπήσετε\*.

## Συμβουλές για διαφορετικούς τύπους επιδερμίδας



Η **τριχοφυΐα** μπορεί να επηρεάσει την καλή επικόλληση του αισθητήρα.

Ξυρίστε το σημείο εφαρμογής πριν τοποθετήσετε τον αισθητήρα σας.



Τα προϊόντα περιποίησης σώματος (π.χ. ενυδατική κρέμα) μπορεί να αφήσουν **κατάλοιπα λιπαρότητας**.

**Πλύνετε, απολυμάνετε και στεγνώστε** το σημείο εφαρμογής πριν εφαρμόσετε τον αισθητήρα σας.

## Χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη επικόλληση



### Θυμηθείτε

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες προετοιμασίας και εφαρμογής του αισθητήρα.



### Μην Ακουμπάτε τον Αισθητήρα

Προσπαθήστε να μην τραβάτε, να μην αγγίζετε και να μην παίζετε με τον αισθητήρα ενώ τον φοράτε.



### Ντύσιμο

Φορέστε ελαφριά ρούχα με χαλαρή εφαρμογή†. Όταν βάζετε ή βγάζετε τα ρούχα σας, προσέξτε να μην ξεκολλήσετε τον αισθητήρα.



### Αθλητισμός & Σωματικές Δραστηριότητες

Ένα επίθεμα†† μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον αισθητήρα σας πιο ασφαλή κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής δραστηριότητας. Εάν ο αισθητήρας χαλαρώσει λόγω εφίδρωσης, χρησιμοποιήστε κάποιο από τα προτεινόμενα προϊόντα παρακάτω.



### Ντους & Μπάνιο


Μετά το ντους ή το μπάνιο, προσέξτε πώς θα σκουπιστείτε με την πετσέτα σας για να αποφύγετε να αποκολλήσετε τον αισθητήρα.



### Καθημερινές Μετακινήσεις

Προσέξτε να μη «χτυπήσετε» τον αισθητήρα σας σε πόρτες, σε έπιπλα ή στη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου.

## Προϊόντα για καλύτερη επικόλληση\*\*

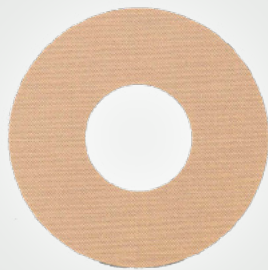

### Αυτοκόλλητος Επίδεσμος

Ιατρικό αυτοκόλλητο επίθεμα σε επίδεσμο ή ταινία††

### Skin-Prep® Protective Barrier Wipes

Συμβάλλει στην καλύτερη επικόλληση των επιθεμάτων στην επιδερμίδα  
[smith-nephew.com](http://smith-nephew.com)

### Torbot Skin Tac™

Υποαλλεργικό, κολλώδες προστατευτικό φιλμ χωρίς latex  
[torbot.com](http://torbot.com)

### Mastisol® Liquid Adhesive

Διαφανές υδροκολλοειδές, που δεν προκαλεί ερεθισμούς, για καλύτερη επικόλληση των επιθεμάτων  
[eloquesthealthcare.com](http://eloquesthealthcare.com)

### Tegaderm I.V.

Διαφανές φιλμ που βοηθάει στην επικόλληση  
[3m.com](http://3m.com)

Έχετε επιπλέον απορίες;  
Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!

---

Επικοινωνήστε με τη Γραμμή Υποστήριξης Πελατών  
**FreeStyle** στο τηλέφωνο  
**800 11 222 688**

---

Οι εξειδικευμένοι εκπρόσωποί μας είναι στη διάθεσή σας  
Δευτέρα με Παρασκευή μεταξύ 09.00 και 17.00



\* Ο αισθητήρας είναι ανθεκτικός στο νερό σε βάθος 1 μέτρου για έως 30 λεπτά.

† Η συσκευή ανάγνωσης μπορεί να συλλέξει δεδομένα από τον αισθητήρα όταν βρίσκεται σε απόσταση 1 έως 4 εκ. από τον αισθητήρα.

\*\* Η λίστα δεν είναι διεξοδική και δε συνιστά εγγύηση για τον κατασκευαστή ή για την ποιότητα των προϊόντων. Το τμήμα διαβήτη της Abbott δεν είναι υπεύθυνο για την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με αυτά τα προϊόντα. Η διαθεσιμότητά τους μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών για κάθε προϊόν.

†† Η εφαρμογή του επιδέσμου πρέπει να γίνεται κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα και η οπή στο κέντρο του αισθητήρα δεν πρέπει να καλύπτεται. Μπορείτε να τοποθετείτε και επιπλέον ιατρικά επιθέματα, αλλά είναι σημαντικό να τα αφαιρείτε μόνο αφού λήξει ο ενεργός αισθητήρας.

Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα, το FreeStyle, το Libre και οι σχετικές εμπορικές επωνυμίες είναι σήματα της Abbott.

©2023 Abbott. ADC-75277, v3.0 06/23