



# UZAKTAN DİYABET YÖNETİMİ MÜMKÜN!



Diyabetliler, sağlık uzmanları ile glukoz verilerini uzaktan paylaşabilir, yüzyüze olmadan dahi diyabet yönetimine kesintisiz devam edebilirler.




FreeStyle Libre 

 Abbott

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.  
© 2023 Abbott. FreeStyle, Libre ve ilgili markalar Abbott'un markalarıdır.  
www.abbott.com.tr


Diyabetliler FreeStyle Libre sensörlerini FreeStyle LibreLink mobil uygulamasıyla okutarak kolayca glukozlarını takip edebilirler. Mobil uygulama ile alınan her glukoz ölçümü otomatik olarak LibreView sistemine aktarılır.<sup>2</sup>

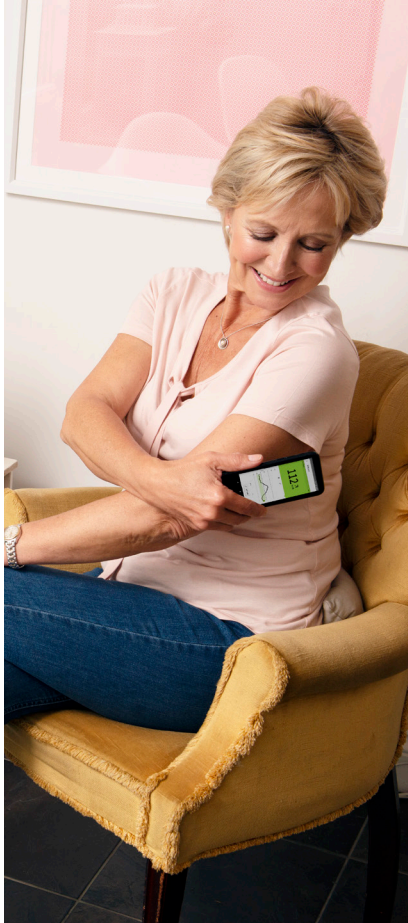

FreeStyle  
LibreLink



LibreView

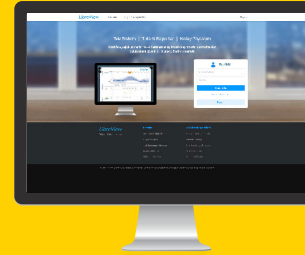

### Diyabetliler için kolay ve kullanışlı

Dilerseniz mobil uygulama ile dilerseniz okuyucu ile, dilerseniz her ikisi ile birlikte ölçümünüzü yapabilirsiniz. Her ikisi ile ölçüm yapılacağı zaman mutlaka sensörü öncelikli olarak okuyucu sonra mobil uygulama ile başlatmak gerektiği unutulmamalıdır.<sup>1</sup>

### Sağlık uzmanları için kolay ve kullanışlı

FreeStyle LibreLink ile alınan glukoz ölçümleri direkt LibreView sistemine aktarılır. Böylece sağlık uzmanları tek bir sistem üzerinden takip ettikleri tüm diyabetliler için uğraşmadan detaylı raporlara ve glukoz verisine erişim sağlar.<sup>2,3</sup>



1. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması ile FreeStyle Libre okuyucusu benzerdir ancak birbirini aynı ürünler değildir. Glukoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glukoz düzeyleri kan glukoz düzeylerini doğru olarak yansıtmadığında veya sistem hipoglisemi ya da yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde veya belirtiler sistem okumalarıyla uyumadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile parmaktan ölçüm yapılması gerekir. 2. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android 7.1 veya üzeri ve iPhone 7 iOS 13 veya üzeri telefonlarla uyumludur. 3. LibreView, Safari tarayıcısında Mac OS X Mountain Lion ve yukarıya veya iOS ve yukarıya cihazlarda kullanılabilir. Şu an sadece Windows tabanlı bilgisayarlara glukoz verisi yüklenebilir. Minimum sistem gereksinimleri için "<http://www.libreview.com>" [www.libreview.com](http://www.libreview.com) adresine göz atabilirsiniz.

# Etkin diyabet yönetimi için detaylı ve kolay anlaşılır glukoz raporları<sup>1</sup>



## Kolay veri yükleme

FreeStyle LibreLink ile yapılan glukoz ölçümleri otomatik olarak LibreView sisteminde görüntülenir. Ayrıca okuyucudan gelen verilerinizi de bağlantı kablonuzla kolayca LibreView'a aktarabilirsiniz.




## Uzaktan erişim

İnternet erişimi olan herhangi bir cihazdan kolayca sisteme giriş yapılabilir. Detaylı glukoz verilerinize hem siz hem de sağlık uzmanınız kolayca ulaşabilir.



## Güvenli ve güvenilir

Glukoz verilerine çevrimiçi olarak güvenli, bulut tabanlı bir sistem üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir.

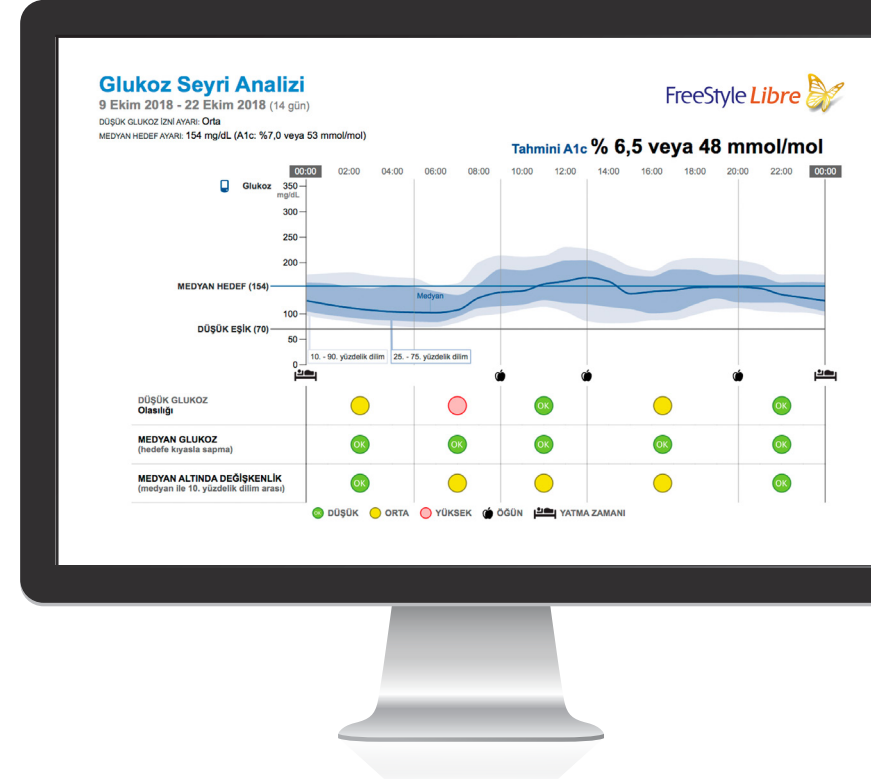

LibreView sisteminin sunduğu tüm raporları inceleyebilmek için [www.libreview.com](http://www.libreview.com)'a göz atabilirsiniz.

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.

<sup>1</sup> LibreView ve LibreLinkUp, birincil glukoz monitör etme aracı olarak tasarlanmamıştır. Kullanıcıların yazılımdan gelen bilgilerle herhangi bir medikal yorum yapmadan ya da tedaviye başlamadan önce mutlaka birincil ölçüm cihazlarını da kontrol etmeleri ve bir sağlık uzmanına danışmaları gerekir. Sağlık uzmanları yazılımdaki bilgilerle, sahip oldukları diğer verileri birleştirerek tedavi kararı vermektedir.

# Diyabetliler, glukoz verilerini uzaktan sağlık uzmanlarıyla kolayca paylaşmak için FreeStyle LibreLink uygulamasını kullanabilirler.<sup>1</sup>



## FreeStyle LibreLink ile SAĞLIK UZMANINIZA BAĞLANIN<sup>1</sup>

FreeStyle Librelink mobil uygulama üzerindeki Bağlantılı Uygulamalar butonundan LibreView bölümüne gidilerek “Sağlık Uzmanı Grubuna Bağlan” özelliği ile; diyabetlilerin kolayca glukoz verilerini uzaktan sağlık uzmanlarıyla paylaşabilmeleri sağlanır.

FreeStyle  
LibreLink



## Diyabetlilerin glukoz verilerini görüntülemek için güvenilir çevrimiçi sistem

Otomatik aktarılan glukoz verileri ile sağlık uzmanları uzaktan da hasta takibi yapabilir ve etkili tedaviye kesintisiz devam edebilir.<sup>3</sup>

LibreView



### Kolayca bağlanın

Mobil uygulamanız üzerinden; sağlık uzmanınızdan gelen daveti kabul edebilir ya da sağlık uzmanı grup kimliğini sağlık uzmanınızdan alarak siz bağlanabilirsiniz.

### Kolay ve kullanışlı

Bağlandıktan sonra diyabetlilerin glukoz verileri otomatik olarak FreeStyle LibreLink uygulamasından LibreView'a yüklenir. Sağlık uzmanının ya da yardımcılarının veri yükleme, indirme gibi süreçlerle uğraşmasına gerek yoktur.

### Uzaktan diyabet yönetimi

Daha bilinçli tedavi kararları ve uzaktan dahi etkin diyabet yönetimi için glukoz raporlarına kolay erişim sağlar.

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.


<sup>1</sup>. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması Android 7.1 veya üzeri ve iPhone 7 iOS 13 veya üzeri telefonlarla uyumludur. Telefonunun NFC uyumluluğunu telefon ayarlarından kontrol edebilir ya da telefon üreticinden bilgi alabilirsiniz. FreeStyle LibreLink kullanımı için LibreView'a kaydolman gerekir ve otomatik glukoz verisi aktarımı için kablosuz internet bağlantısı veya mobil veri bağlantısına ihtiyaç vardır. <sup>2</sup>. Sensör okutarak şeker ölçümü parmak delmeyi gerektirmez, mobil uygulamalar ve sistemler arası data aktarımı mobil cihazın internet erişimi ve bağlantı hızıyla doğrudan alakalıdır.

# Sağlık uzmanları; tedavi sürecinde takip ettikleri tüm diyabetlileri glukoz verilerini paylaşmaya kolayca davet edebilirler.

## Seçenek 1:

Sağlık uzmanları LibreView aracılığıyla hastalarını evden veri yüklemeye davet edebilirler.<sup>1</sup>

1. Kayıtlı bir hasta arayın veya navigasyon çubuğunun üst kısmındaki "Hasta Ekle" simgesini tıklayın.
2. Diyabetli kişinin profilinde "Davet Et"i seçin ve diyabetli kişi için doğru e-posta adresini kullandığınızdan emin olun.
3. Davet giden diyabetli kişi, FreeStyle LibreLink uygulamasında ve e-postasında davetiyeyi görür.

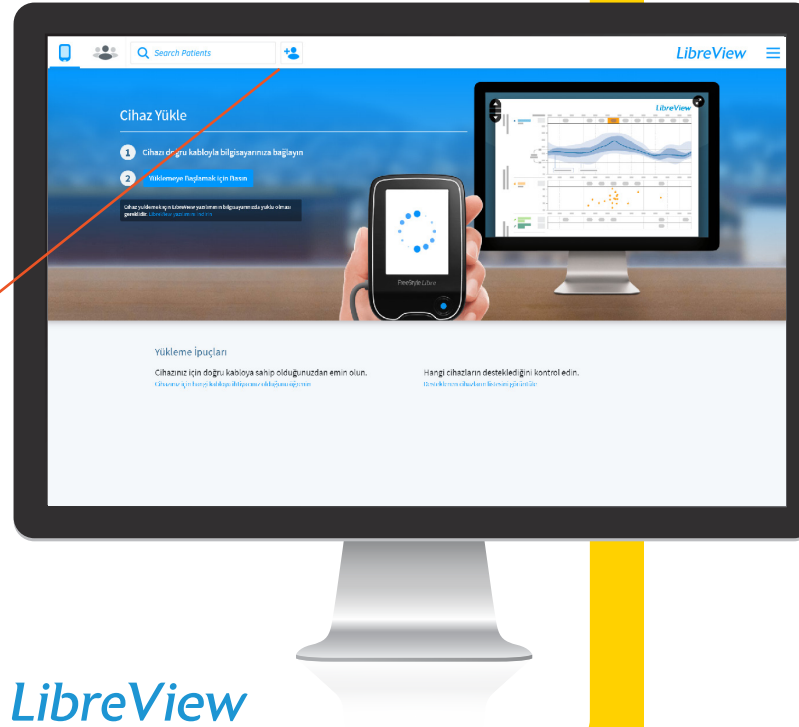

Diyabetliler, e-postalarına gelen davetiyeyi ya da FreeStyle LibreLink mobil uygulamalarına gelen davetiyeyi kabul ederek sağlık uzmanlarına bağlanabilirler.


**Destek için [www.libreview.com](http://www.libreview.com)'daki Müşteri Desteği bölümünü ziyaret edebilirsiniz.**

# Diyabetliler sağlık uzmanlarından alacakları "Sağlık Uzmanı Grubu Kimliği"ni mobil uygulamalarına girerek uzaktan erişim ve veri paylaşımını başlatabilirler.

## Seçenek 2:

Diyabetliler mobil uygulamalarından sağlık uzmanı grubuna bağlanırlar.

Sağlık uzmanının vereceği "Sağlık Uzmanı Grubu Kimliği" ile giriş yapan FreeStyle LibreLink kullanıcısı kolayca sağlık profesyoneli ile bağlantı gerçekleştirebilir. Sağlık profesyoneli grup kimliğine LibreView sağ menüden kolayca erişir ve diyabetli hastasına iletir.

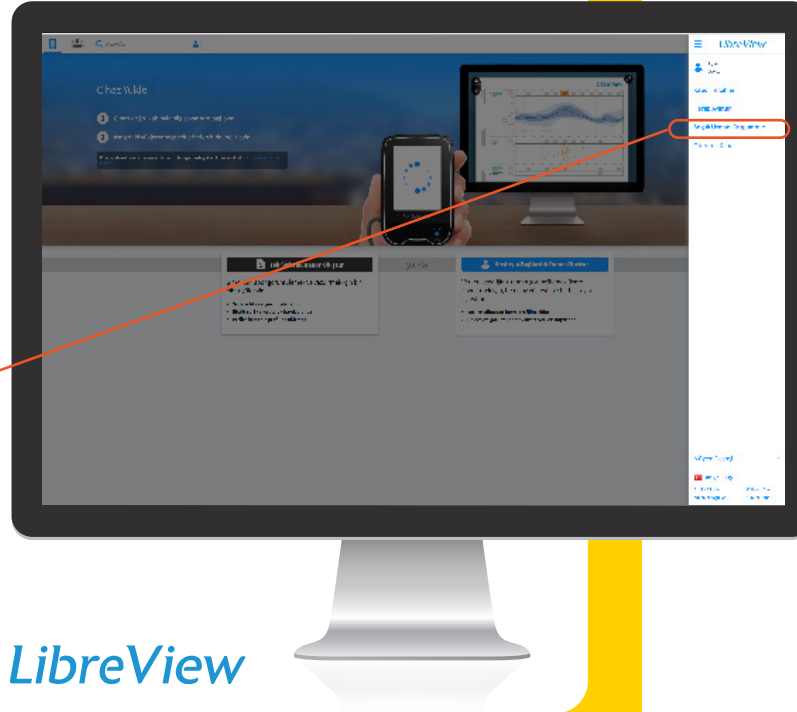

LibreView



FreeStyle LibreLink mobil uygulamasının "Bağlantılı Uygulamalar" bölümünden LibreView alanına giriş yapılır ve buraya "Sağlık Uzmanı Grubu Kimliği" girilir. Ardından "İleri" butonuna basarak bağlantı gerçekleştirilmiş olur.

**Destek için [www.libreview.com](http://www.libreview.com)'daki  
Müşteri Desteği bölümünü ziyaret edebilirsiniz.**



# UZAKTAN DİYABET YÖNETİMİ MÜMKÜN!

Yeni nesil FreeStyle Libre Dijital Diyabet Yönetimi ürünleri ile glukoz verileri sağlık uzmanlarıyla uzaktan paylaşılabilir ve etkin tedavi sürecine kesintisiz devam edilebilir.



- Her ölçüm sonucu otomatik olarak sağlık uzmanının da erişebileceği LibreView sistemine ücretsiz ve kolayca akar.<sup>1</sup>
- FreeStyle Libre okuyucu kullanmaya devam eden kullanıcılar okuyucularındaki verileri bağlantı kablolarıyla kolayca LibreView sistemi üzerinden sağlık uzmanlarıyla paylaşabilir.<sup>2,3</sup>
- LibreView sisteminin sağladığı detaylı raporlar ve kullanımı kolay arayüz ile hem diyabetliler hem de sağlık uzmanları için diyabet yönetimi kolaylaşır ve etkinliği artar. Raporlarda tedavideki ana noktalar kolayca tespit edilip buna uygun tedavi basamakları takip edilebilir.

FreeStyle Libre 

**Sağlık uzmanlarıyla glukoz ölçüm sonuçları evden de paylaşarak etkin diyabet yönetimine kesintisiz devam edilir.**



1. LibreView ve LibreLinkUp, birincil glukoz monitör etme aracı olarak tasarlanmamıştır. Kullanıcıların yazılımdan gelen bilgilerle herhangi bir medikal yorum yapmadan ya da tedaviye başlamadan önce mutlaka birincil ölçüm cihazlarını da kontrol etmeleri ve bir sağlık uzmanına danışmaları gerekir. Sağlık uzmanları yazılımdaki bilgilerle, sahip oldukları diğer verileri birleştirerek tedavi kararı vermelidir. 2. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması ile FreeStyle Libre okuyucusu benzerdir ancak birbirini aynı ürünler değildir. Glukoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glukoz düzeyleri kan glukoz düzeylerini doğru olarak yansıtmadığında veya sistem hipoglisemi ya da yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde veya belirtiler sistem okumalarıyla uyumadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile parmakdan ölçüm yapılması gerekir. 3. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android 7.1 veya üzeri ve iPhone 7 iOS 13 veya üzeri telefonlarla uyumludur. 4. LibreView, Safari tarayıcısında Mac OS X Mountain Lion ve yukarıya veya iOS ve yukarıya cihazlarda kullanılabilir. Şu an sadece Windows tabanlı bilgisayarlara glukoz verisi yüklenebilir. Minimum sistem gereksinimleri için "<http://www.libreview.com>" [www.libreview.com](http://www.libreview.com) adresine göz atabilirsiniz. 5. FreeStyle Libre sistemi 4 yaş ve üzeri diyabetlilerde hücreler arası sıvı glukoz düzeylerini ölçmek için endikedir. 4-17 yaş arasındaki çocukların ürün kullanımı en az 18 yaşında olan bir yakınının gözetimi altında olmasıyla sınırlandırılmıştır. En az 18 yaşında olan bu kişi çocuğun FreeStyle Libre sistemini kullanmakla, ölçümlerini okumakla ve ona yardımcı olmakla sorumludur.

© 2023 Abbott. FreeStyle, Libre ve ilgili markalar Abbott'un markalarıdır. ADC-68787 v.1.0 01/23  
[www.abbott.com.tr](http://www.abbott.com.tr)